


EX.コンパクト携帯防護マスク〈EN 149:2001+A1:2009 規格対応〉

取扱説明書

※ 大切に保管して下さい。

使用方法

図1

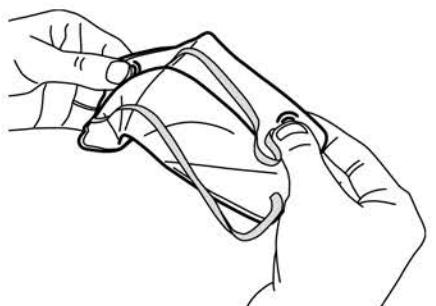

本体を取り出し、両手の親指をマスクの左右に当てる。

図2



マスクを、内部がカップ状になるよう指で開く。

図3



片手でマスクを持ち、鼻と口に当て、残った手でまず下部のゴムバンドを頭の上から通し、首筋に引っかける。次に上部のゴムバンドを頭の後方に引っ張りながら、後頭部に引っかけ、マスクを固定する。

図4



上下のバンドの位置を固定させてから、マスクの位置を調整し、鼻の部分を指で押して、顔に密着させる。

図5



マスクを顔に強く押し付けないようにしながら、マスク全体を両手で覆い、素早く息を吸い込む。マスクの周囲から空気が入り込むようであれば、マスクの位置を調整し、より密着させ、空気が入り込まないようにする。

使用上の注意

- 乳幼児及び呼吸器に異常がある場合は使用不可
- 素材：ポリプロピレン、強化プラスチック、TPE、熱可塑性ウレタン
- サイズ(約)：幅8×長さ10×厚さ1.3cm
- 痒み・かぶれなどの症状が出た場合は使用を中止
- 本品は使い切り商品で洗濯による再使用不可
- 連続使用最長時間は8時間、経過後は使用を中止
- 環境条件・個人差により眼鏡が曇る事があるので、運転時の着用注意
- 乳幼児の手の届かないところに保管
- 高温多湿の環境での保管は避ける
- マスクの内側には何物もささない
- 使用前に異常がないか必ず点検
- マスクの内側には何物もささない
- 酸素濃度17%未満の場合は使用不可
- 有毒ガス・蒸気・有害物質には対応していないから使用不可、専用の防塵マスク、防毒マスクの使用を推奨
- 汚染物質濃度が生命や健康に危険を及ぼす場合は使用しない
- 改造・変更しない
- マスクが損傷したり、呼吸困難になったり、めまいや身体的苦痛が生じた時は使用を直ちに中止
- 顔面に髭がある場合は性能を発揮できないから、髭の除去が必要

<仕様> ●素材：ポリプロピレン、強化プラスチック、TPE、熱可塑性ウレタン ●サイズ(約)：幅8×長さ10×厚さ1.3cm (組み立て時：厚さ6cm)

イタリア BLS社安全マスク 輸入総発売元



〒106-0044 東京都港区東麻布1-17-9
TEL 03-3589-3300 www.metex.co.jp/

お客様ご相談センター

TEL: 03-3589-4555
(土・日曜・祝祭日・正月期間を除く平日9:30~17:30)
FAX: 03-3589-5500 (24時間受付)
E-mail : metex-master@metex.co.jp

メテックス

検索

