



EYEJUSTERS

英国アイジャスターズ社 度数可変シニアグラス「これ一本」

取扱説明書

※取扱説明書は大切に保管して下さい。

アイジャスターズ度数可変シニアグラスをお買い上げ賜り、誠にありがとうございます。
ご使用開始前にこの取扱説明書をよくお読み頂き、正しくご使用下さい。


特徴

進行性老眼から夕方老眼まで、全てを一本でカバー、複数の眼鏡を用意したり、買い替えたりする必要がなく、便利でしかも経済的です(左右独立調節可能、度数調節範囲+0.50～+4.00)。

- ① 度を調節するスライドレンズは表側と裏側の2枚のレンズの間に密閉収納されていますから、ごみや湿気に影響されず、曇ることもなくいつもきれいに見えます。
- ② 英国トップデザイナーによる、斬新なデザインのオックスフォード(ポリアミド系フレーム)、オックスブリッジ(複合素材フレーム)の3モデルがあり、それぞれシャープさとシックさを兼ね備えた素敵なデザインです。
- ③ 硬質のアクリル素材のレンズは軽量ですが傷がつきにくく耐久性も高く、長く使えます。
- ④ 調節ダイヤルは3/4回転しか回りません。絶対に無理に回さないで下さい。左右とも内側(右は左側、左は右側)に回すと度が強くなり、外側に回すと度が弱くなります。
- ⑤ シニアグラスとして、どなたにでもお使い頂けますから、災害時備蓄用品として備えておかれると共用でき、とても便利です。

ご使用方法

- ① 本体をケースから取出し、装着します。
- ② 左目を閉じ、右側の調節ダイヤルを回し、スライドレンズを移動させて焦点を合わせます。
- ③ 同じように右目を閉じ、左側の調節ダイヤルを回し、左目の焦点を合わせます。
(目を閉じる代わりに片手でそれぞれの目を覆ってもできます)

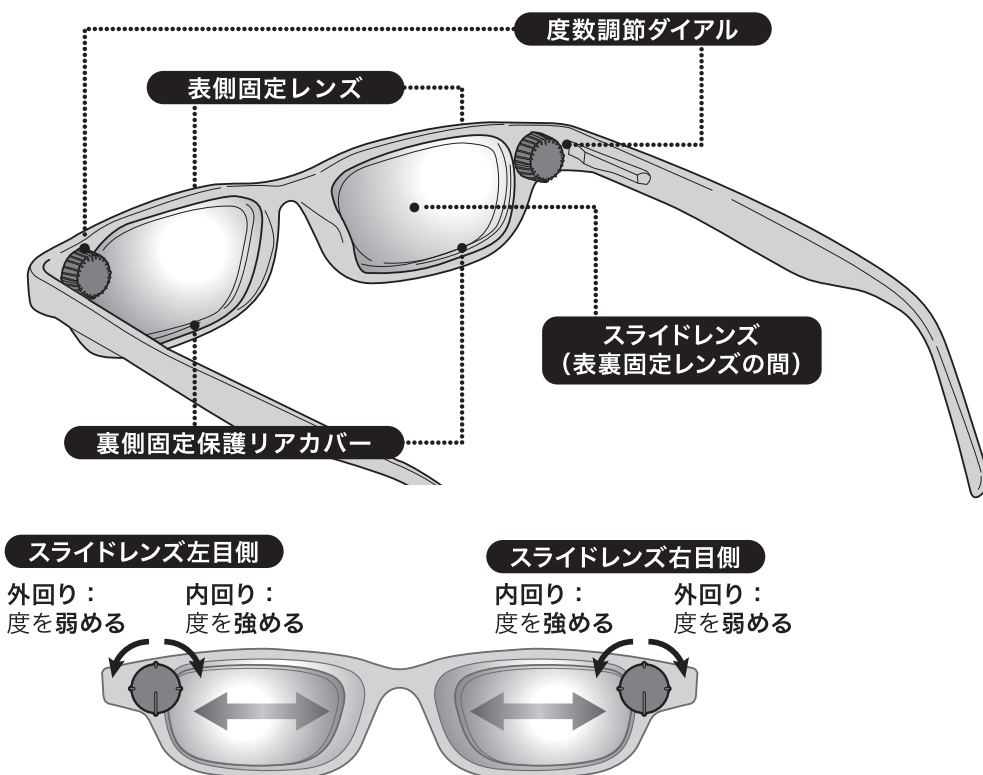

お手入れ方法

- ① 付属のマイクロファイバークリーニングクロスでやさしく拭いて下さい。
- ② 汚れが落ちない時は市販のメガネ用洗淨液をお使い下さい。但しダイヤル付近を濡らさないようご注意ください。
- ③ アイジャスターズは精緻な構造ですから、強い力や衝撃から保護する為、使用しない時はケースに入れて保管して下さい。

⚠️ ご使用上の注意

- シニアグラスは近くを見るための老眼用(遠視用)で、遠くを見るための近視用のメガネではありません。
- リスクの高い作業や自動車の運転には使用しないで下さい。
- 調節ダイヤルは3/4回転で止まります。絶対にそれ以上回さないで下さい。故障の原因になります。
- シャワーやお風呂に入りながらのご使用、水洗いなどはしないで下さい。
- 必要以上に長時間の使用は避けて下さい。
- 万一目に異常があった場合、あるいは体調不良になった場合は使用を中止して医師に相談して下さい。
- 乱視には対応していません。
- 目を保護するためには使用しないで下さい。
- 14歳以下の方にはお勧めできません。

品質表示

※本仕様は改善や改良のために予告なく変更されることがあります。

※包装やカタログの色と実物の色とは、印刷の都合により異なることがあります。

モデル名	オックスフォード		オックスブリッジ
サイズ(約)mm: 幅×奥行×高さ	144×140×31		140×140×31
重さ(約)	30g		35g
瞳孔間距離(約)	60mm		60mm
材質	レンズ	スクラッチプルーフ アクリル(PMMA)	
	フロント	ポリアミド12	ステンレス
	つる	セルロースプロピオネート	アセテート
	鼻あて	ポリアミド12 (フレームに一体化)	シリコン
その他	生産国: イギリス 一般医療機器届出番号: 13B2X10122000005		
備考	付属品: マイクロファイバークリーニングクロス、ハードケース、取扱説明書		

保証規定 持込修理

取扱説明書に従い正しく使用されたにも関わらず、製品が故障した時は、お買上後1年間、下記規定に従い保証致しますので、当社お客様ご相談室にご連絡下さい。

- ① 保証条件: お買上時の領収書又は送り状など、お買上日と購入先が確認できる書類をご提示下さい。ご提示が無いと保証致しかねますので、必ず書類を保管して下さい。
- ② 対象品: 当社が正規に輸入し、日本国内でお買上になった商品に限ります。
- ③ 持込修理: 故障や不具合があった場合は、当社お客様相談室にお電話頂くか、当社に送料お客様ご負担でお送り下さい。当社にて検査の上、必要な場合、修理の上、故障が製品不良と判断された場合は、当社負担にて返送致します。もし原因が保証対象で無い場合は、当社より修理費用などをご連絡します。お買上後10日以内にご連絡を頂いた初期不良は、当社にて商品を引き取り、修理の上返送させて頂きまますので、商品到着後はすぐに開封して商品をお試し頂くようお勧めします。もし修理不能と判断された場合は、同等の代替品と交換させて頂きます。
- ④ 有償修理: 下記の場合は保証期間内でも、有償修理とさせていただきます。
 - お客様により改造・加工されていた時。
 - 不適切な取り扱いや使用による故障・不具合。
 - ご使用中の外装面の傷や破損。
 - お買上を証明する書類の提示が無い場合。

専用ネックレスタイプ グラスコード(別売)

アイジャスターズにぴったりフィットするメンズ・レディースを問わないシンプルでシックなネックレスタイプ。シリコンリングをメガネのつるの両端に差し込むだけの簡単装着。

英国アイジャスターズ社 度数可変シニアグラス
日本総代理店・輸入総発売元



〒106-0044 東京都港区東麻布 3-3-9
アネックス麻布十番オフィス 3階
TEL03-3589-3300 www.metex.co.jp/

メテックス 検索

お客様ご相談室

TEL: 03-3589-4555
(土・日曜、祝祭日・年末年始を除く平日9:15~17:15)
FAX: 03-3589-5500 (24時間受付)
E-mail: metex-master@metex.co.jp

