
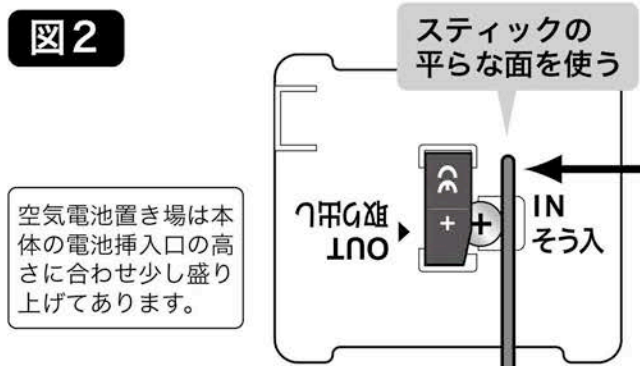


## Ex.Silent QリーフPro・QリーフGo用 新収納ケース及び空気電池交換作業台 使用方法

この収納ケースと作業台は、上記補聴器・聴音補助器の各部品を使いやすく収納でき、作業台は小さな空気電池を誰でも簡単に交換できるよう、特別に開発されました。専用収納ケース中央部にはめても、取り出して単体でも使用できますが、必ず平らな固定できる場所に置いてお使い下さい。尚本文では、QリーフPro及びQリーフGoを総称して、Qリーフ又は、本体と表示します。



### 電池を入れる時

- ① Qリーフの上下と裏表を図1と同じように、作業台中央の位置にセットする。
- ② 空気電池を図2の位置に+を上(表側)にして置く。
- ③ 付属の黒いスティックの広い面を使って、電池を本体に寄せるようにして押込む。

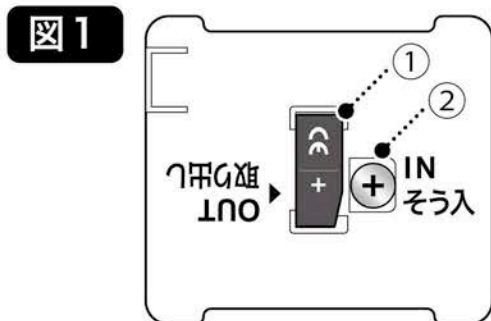

### 電池を外す時

- ① 作業台を電池を入れる時と上下を反対にし、本体を図3のようにセットする。
- ② 付属の電池取り出しスティックを使って、図4のように穴に差し込み、電池を押し出す。

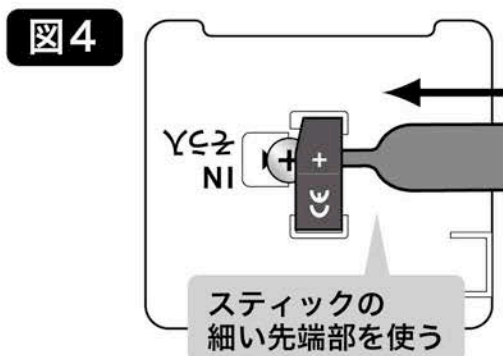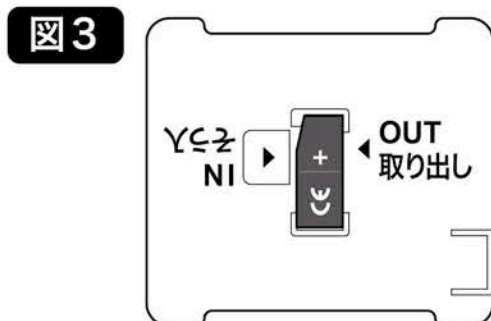

### ※ 注意

- 本製品を使用しない時は、電池を取り外して保管した方が、電池が多少長持ちする。
- 取り外した電池を、乳幼児が誤って服用しないように、取り外したまま放置しない。
- 乾燥剤が入った収納ケースには、シールをはがした電池は収納しない。

## 収納ケースと内容物

従来は取扱説明書記載の小形ケースを標準品としておりましたが、Qリーフ製品をより便利にお使い頂けるよう、下記の軽量アルミケースを開発し、標準品としております、ご了承下さい。

※図のように内容物を収納可能。



### 拡大レンズを使用して電池交換する

- ① 拡大レンズを、収納ケース上ふたの内側にあるスリットに横向きに差し込む。レンズを覗き込み、対象物が見えやすい角度に設定する。
- ② 収納ケースを動かさないよう片手で押さえながら(図5)、電池を本体に挿入したり、取出す。付属の電池交換作業台を使用すると便利。

図5



- 自然な良い聴こえの為に両耳装着を推奨。本体が二個あると故障・メンテナンスの際にも便利。
- 収納ケース同梱の乾燥剤は、お手元にお届けする迄の乾燥用。使用開始後の本体乾燥保管の為に、別途密閉乾燥容器と乾燥剤(お問い合わせ下さい)の使用を推奨。
- シールをはがした空気電池を乾燥ケースに保管すると消耗が進むので乾燥保管しない。
- 内容物の形状や数量については、メーカー都合により変更される事がありますのでご了承下さい。

オランダ エクサイレント社 日本総代理店・輸入総発売元

健康・快適を世界から  
**METEX**  
株式会社 **メテックス**

〒106-0044 東京都港区東麻布1-17-9  
TEL03-3589-3300 www.metex.co.jp/

### お客様ご相談センター

TEL: 03-3589-4555  
(土・日曜、祝祭日・正月期間を除く平日9:30~17:30)  
FAX: 03-3589-5500 (24時間受付)  
E-mail: metex-master@metex.co.jp

メテックス 検索